

Nedap Luna Handleiding

Productnaam

Naam: Nedap Luna


Model: Assy Luna01 Black - Generatie 1

Copyright en disclaimer

Copyright © Nedap N.V., Parallelweg 2, NL-7141 DC Groenlo, Nederland. Dit document is eigendom van Nedap N.V. en de inhoud mag niet, geheel noch gedeeltelijk, worden verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van Nedap N.V. Nedap N.V. geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende verklaringen of garanties over de juistheid en volledigheid van dit document. Je gebruikt dit product op eigen risico. Nedap N.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit document en/of de beschreven producten. Raadpleeg het portaal (support.nedap-ons.nl) voor wijzigingen en aankondigingen.

Wat als de Nedap Luna niet meer gebruikt wordt?

Gooi de Nedap Luna niet weg! Gebruik je de Nedap Luna niet meer? Ontkoppel dan eerst het gebruikte Caren-account van je Nedap Luna en lever het apparaat dan in bij de zorginstelling waarvan je de Nedap Luna hebt gekregen. Op die manier kan de Nedap Luna bij iemand anders worden ingezet. Nedap is niet aansprakelijk en niet verantwoordelijk voor het verzamelen of verwijderen van de Nedap Luna. Hoe je de Nedap Luna terug kan sturen vind je op het support portaal: support.nedap-ons.nl.

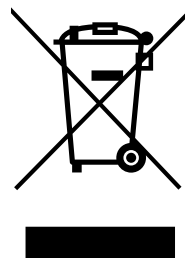

Veiligheidsinstructies

Volg onderstaande veiligheidsmaatregelen bij gebruik:

- Gebruik de Nedap Luna uitsluitend voor doeleinden waarvoor deze door Nedap expliciet is aangemerkt als geschikt.
- De Nedap Luna mag alleen worden gerepareerd en onderhouden door Nedap N.V.
- Maak geen aanpassingen aan de Nedap Luna buiten de in deze handleiding beschreven stappen of van Nedap N.V. afkomstige adviezen om de veiligheid van het apparaat te garanderen.
- Plaats de Nedap Luna op een vlakke en horizontale ondergrond.
- De netspanning en elektrische belasting van de adapter moeten overeenkomen met de richtlijnen op het productlabel.
- Schoonmaken met een droge doek.
- Niet onderdompelen.

Vervanging van onderdelen

De Nedap Luna bevat geen onderdelen die door de gebruiker zelf vervangen of gerepareerd kunnen worden, met uitzondering van de batterijen. Schroef de Nedap Luna nooit open. Bij kapotte onderdelen of bij einde gebruik kan de Nedap Luna via de zorginstelling geretourneerd worden naar Nedap, zie hierboven.

Batterij

De Nedap Luna werkt alleen als het aangesloten is op netstroom. Echter bevat de Nedap Luna ook vier vervangbare, niet-oplaadbare AA-batterijen. De batterijen zorgen ervoor dat het scherm nog van beeld kan verwisselen wanneer de stekker uit het stopcontact is, zodat de laatst getoonde afspraak niet blijft staan en voor verwarring kan zorgen. Wanneer vervanging nodig is, toont de Nedap Luna het volgende scherm:



Volg de onderstaande procedure om de batterijen te vervangen.

- Open het batterijcompartiment door het klepje aan de bovenkant los te klikken met een vinger of een dun/langwerpig (maar niet scherp) voorwerp.
- Verwijder de vier batterijen. Volg de plaatselijke milieubeschermingswetten/voorschriften voor het weggooien van gebruikte batterijen.
- Plaats er vier nieuwe batterijen voor terug. Zorg ervoor dat de polariteit overeenkomt met de aangegeven polariteit. Zie 'Specificaties' voor de batterijvereisten. Extra uitleg bij de specificatie: Bij gebruik van batterijen die hier niet aan voldoen werkt de Nedap Luna mogelijk niet of slechts heel kort.
- Sluit het batterijcompartiment en controleer of de Nedap Luna goed werkt.

CE-verklaring

Hierbij verklaart Nedap N.V. dat de Nedap Luna in overeenstemming is met de richtlijnen 2014/53/EU (inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur) en 2011/65/EU (inzake gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur). De volledige EU-conformiteitsverklaring en REACH-informatie (waar van toepassing) vind je op het support portaal: support.nedap-ons.nl.



Specificaties

Productnaam: ASSY LUNA 01 BLACK

Adres producent: Nedap Healthcare, Parallelweg 2, 7141 DC Groenlo, Nederland

Afmeting Nedap Luna: 199mm x 262mm x 31mm

Materiaal behuizing: Stootvast polystyreen (HIPS)

Temperatuurbereik bij gebruik: 0 - 50 graden Celsius. Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik de meegeleverde voeding.

Batterij: formaat AA, 1.5V - 4 x Duracell Procell PC2400 of equivalent

Adapter: Te gebruiken met de door Nedap meegeleverde adapter: Nedap p/n 9566961 (Globtek, type GT-86120-1005-W2E of WR9MA2000USBC-N(R6B))